

OTICON | **ConnectLine**
Mikrofon



Instrukcja obsługi

oticon
PEOPLE FIRST

Wprowadzenie

Z tej instrukcji dowiesz się, jak obsługiwać Twój nowy Mikrofon ConnectLine i jak o niego dbać. Przeczytaj uważnie całą instrukcję, z rozdziałem „**Ostrzeżenia**” włącznie. Pomoże Ci to w pełni wykorzystać możliwości Mikrofonu ConnectLine.

Jeżeli masz pytania dotyczące użytkowania lub konserwacji Mikrofonu ConnectLine, skontaktuj się z protetykiem słuchu.

Na dole strony znajdziesz pasek menu, który ułatwi Ci poruszanie się po instrukcji.

| **Informacje** | [Uruchamianie](#) | [Obsługa](#) | [Ostrzeżenia](#) | [Informacje dodatkowe](#) |

Przeznaczenie

Mikrofon jest przeznaczony do użytku przez osobę rozmawiającą z użytkownikiem aparatów słuchowych. Mikrofon przesyła sygnał mowy bezpośrednio do aparatów słuchowych, umożliwiając użytkownikowi aparatów lepsze słyszenie rozmówcy.

Spis treści

Informacje

Zawartość opakowania	6
Opis produktu	7
Działanie mikrofonu	8
Ładowanie / wskaźnik zasilania	10

Uruchamianie

Parowanie / ustawienie wstępne (wymagane tylko raz)	12
---	----

Obsługa

Uruchamianie / włączanie / wznawianie dźwięku z mikrofonu	16
Wstrzymanie dźwięku	18
Wznawianie dźwięku ze Streamera Pro	20
Sprawdzanie dźwięku	22
Wyłączanie mikrofonu	23

Ostrzeżenia

Mikrofon nie jest zabawką	24
Korzystanie w samolocie	24

Aktywne implanty	24
Nie można wystawiać mikrofonu na działanie wysokich temperatur	25
Czyszczenie	25
Do ładowania można stosować jedynie sprzęt zgodny z normami UL/IEC	25
Korzystanie ze smyczy	25
Niebezpieczeństwo wybuchu	26
Produkty zgodne z dyrektywą RTTE	26
Rentgen, CT, MR, PET i elektroterapia	26

Informacje dodatkowe

Karta gwarancyjna	28
Gwarancja międzynarodowa	29
Ważne dodatkowe informacje	32
Ogólne warunki gwarancji	36

Zawartość opakowania

Mikrofon



Pokrowiec



Smycz



Zasilacz (ładowarka)



Ta instrukcja



*Model zasilacza różni się w zależności od kraju.

Opis produktu




Wskaźnik stanu (pomarańczowy)

Wejście mikrofonu (głos)

Wskaźnik zasilania (zielony)


Przycisk wł./wyl.

Wejście mikrofonu (wykrywanie hałasu), nie zakrywać

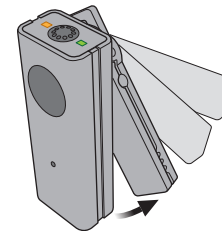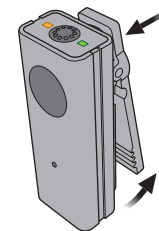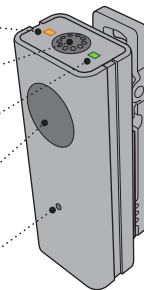

Działanie mikrofonu

Mikrofon przesyła głos rozmówcy wprost do aparatu słuchowego użytkownika.

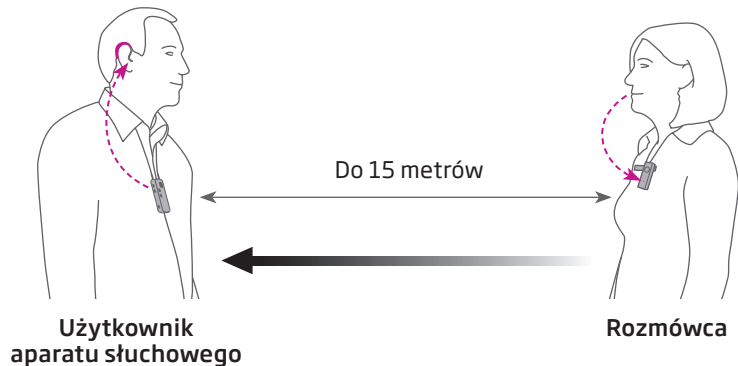


Mikrofon powinien być skierowany w stronę ust rozmówcy w odległości 10-20 cm.




Uwaga: Mikrofon pracuje jednocześnie tylko z jednym Streamerem.

Ładowanie / wskaźnik zasilania

Aby naładować mikrofon, podłącz przewód zasilacza do złącza mini USB na spodzie mikrofonu.

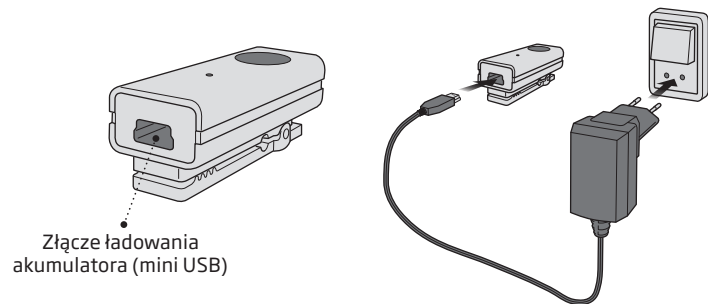


Stałe czerwone światło

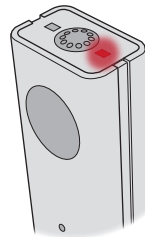


Słaby akumulator; pozostało maksymalnie 20 minut pracy.

Migające zielone światło

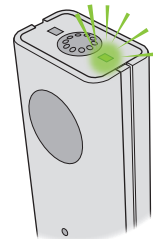

Ładowanie.

Stałe zielone światło

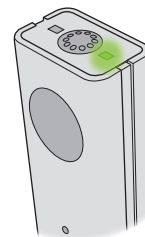

W pełni naładowany po ok. 1,5 godziny; po pełnym naładowaniu można korzystać z mikrofonu przez 5 godzin.

Parowanie / ustawienie wstępne (wymagane tylko raz)

1. Streamer Pro w trybie parowania




Naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wył. u góry.



6 sek.


Przytrzymaj, aż wskaźnik zaświeci się niebieskim światłem.

2. Mikrofon w trybie parowania

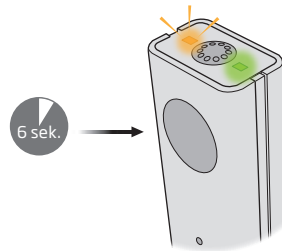


6 sek.

Naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund przycisk wł./wył. mikrofonu, aż pomarańczowy wskaźnik zacznie szybko migać.

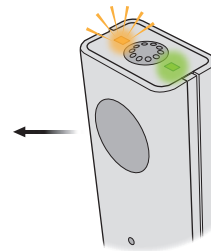

W trybie parowania pomarańczowy wskaźnik szybko miga.

3. Mikrofon sparowany

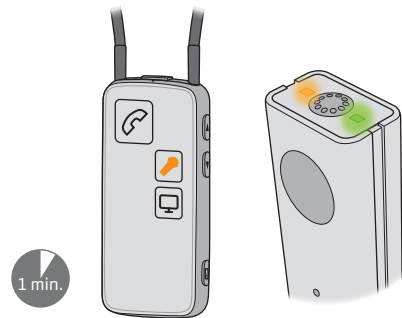

Odczekaj 1 minutę, aż pomarańczowy wskaźnik Streamera Pro i mikrofonu włączą się.


Uruchamianie / włączanie / wznowianie dźwięku z mikrofonu

1. Upewnij się, że Streamer Pro jest włączony



Naciśnij przycisk wł./wył. na górze, aż wszystkie wskaźniki z przodu i na górze zaświecą się, wskazując, że urządzenie jest włączone.

2. Uruchom/włącz mikrofon

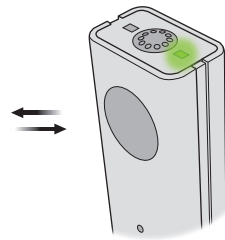

Naciśnij krótko przycisk wł./wył.



Pomarańczowy wskaźnik wolno miga.


3. Dźwięk z mikrofonu do Streamera Pro




Pomarańczowy wskaźnik Streamera Pro i mikrofonu świecą się.

Wstrzymanie dźwięku


a. Wstrzymanie dźwięku z mikrofonu

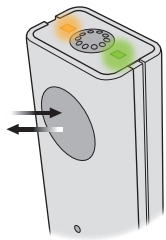

Naciśnij krótko przycisk wł./wył.

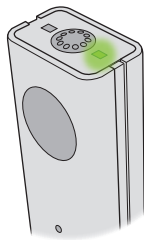

Pomarańczowy wskaźnik mikrofonu wyłącza się.

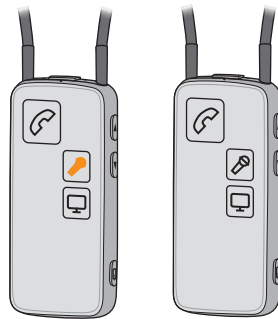

Pomarańczowy wskaźnik na Streamerze Pro wyłącza się.


b. Wstrzymanie dźwięku ze Streamera Pro



Naciśnij krótko przycisk mikrofonu na Streamerze Pro.




Pomarańczowy wskaźnik na Streamerze Pro wyłącza się.

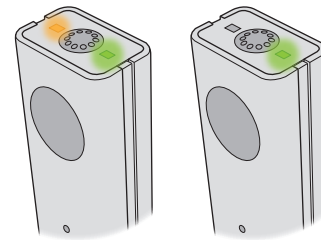

Pomarańczowy wskaźnik mikrofonu wyłącza się.


Wznawianie dźwięku ze Streamera Pro

1. Mikrofon musi być włączony

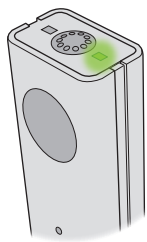

(Świeci się zielony wskaźnik)

2. Włączenie dźwięku ze Streamera Pro

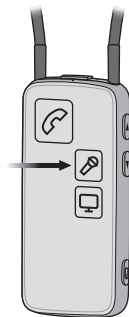


Naciśnij krótko przycisk mikrofonu na Streamerze Pro.




Pomarańczowy wskaźnik na Streamerze Pro miga powoli.

3. Dźwięk z mikrofonu do Streamera Pro

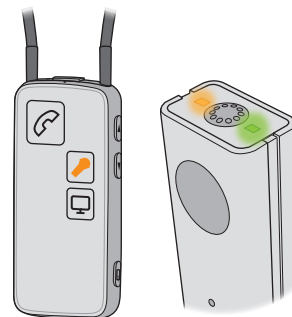


Po 2 sekundach włącza się pomarańczowy wskaźnik mikrofonu.

Sprawdzanie dźwięku

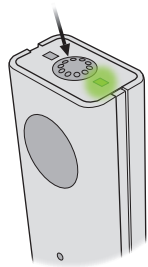

Postukaj w górną część mikrofonu, aby sprawdzić, czy słychać dźwięk w aparacie słuchowym.

Wyłączanie mikrofonu

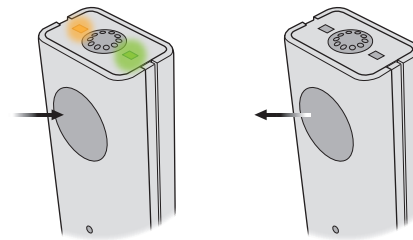

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sek., aż wyłączy się zielony wskaźnik.

Ostrzeżenia

Prosimy o zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z Mikrofonu ConnectLine. Zawarto w niej istotne informacje dotyczące właściwego i bezpiecznego używania mikrofonu.

Mikrofon nie jest zabawką

- Mikrofon ConnectLine nie jest zabawką i powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci lub kogokolwiek, kto mógłby połączyć jakiś element, czy też w inny sposób wyrządzić sobie krzywdę. Szczególną uwagę należy zwracać na małe części, aby nie zostały połknięte przez dzieci i nie spowodowały zakrzuszenia. W przypadku połknięcia elementu należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Korzystanie w samolocie

- Nie należy korzystać z Mikrofonu ConnectLine na pokładzie samolotu bez wyraźnej zgody personelu pokładowego.

Aktywne implanty

- W przypadku tego typu implantów należy zachować ostrożność. Mikrofon ConnectLine wykorzystuje funkcję bezprzewodowej transmisji. Trzymaj mikrofon w odległości co najmniej 15 cm od implantu, np. nie noś mikrofonu w kieszonce na piersi. Zaleca się postępowanie zgodnie z wytycznymi producenta implantu, np. rozrusznika serca, dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych.

- Jeżeli masz aktywny implant wszczepiony do mózgu, skontaktuj się z producentem urządzenia, aby uzyskać informacje na temat możliwych zakłóceń.

Nie można wystawiać mikrofonu na działanie wysokich temperatur

- Nigdy nie wolno wystawiać Mikrofonu ConnectLine na działanie wysokich temperatur, umieszczając urządzenie w piekarniku, kuchence mikrofalowej lub wrzucając do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji i spowodowania poważnych obrażeń.

Czyszczenie

- Firma Oticon zaleca regularne czyszczenie za pomocą wilgotnej ściereczki nie zawierającej rozpuszczalników.

- Nie zanurzaj Mikrofonu ConnectLine w wodzie ani w innych płynach.

Do ładowania można stosować jedynie sprzęt zgodny z normami UL/IEC

- Bezpieczeństwo ładowania akumulatora przez złącze USB zależy wyłącznie od sprzętu zewnętrznego. Gdy złącze USB jest podłączone do urządzeń zasilanych z sieci, muszą one być zgodne z normą UL lub z normami IEC 60950, IEC-60065, IEC-60601 lub równoważnymi normami bezpieczeństwa.

Korzystanie ze smyczy

- Jeśli w trakcie noszenia smycz zaczepi o coś, specjalny mechanizm spowoduje rozpięcie się smyczy. Dlatego nigdy nie należy samodzielnie skracać ani modyfikować smyczy. Dzieci ważące mniej niż 11 kg nie powinny używać smyczy.

Ostrzeżenia

Niebezpieczeństwo wybuchu

- Źródło zasilania mikrofonu nie ma wystarczającej energii, aby wywołać pożar w normalnych warunkach użytkowania. Mikrofon nie został jednak sprawdzony pod kątem zgodności z międzynarodowymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia wybuchem. Nie należy używać mikrofonu w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

Produkty zgodne z dyrektywą RTTE

- W przypadku korzystania z Mikrofonu ConnectLine na terytorium Norwegii wymagane jest, by w promieniu 20 km od centrum Ny-Aalesund nie odbywała się transmisja sygnału radiowego.

Rentgen, CT, MR, PET i elektroterapia

- Nie można nosić mikrofonu podczas badania rentgenowskiego, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania PET, elektroterapii lub operacji.

Karta gwarancyjna

Imię i nazwisko nabywcy: _____

Wydana przez: _____

Adres: _____

Telefon: _____

Data zakupu: _____

Okres gwarancji: _____ Miesiąc: _____

Model: _____ Nr seryjny: _____

Gwarancja międzynarodowa

Producent urządzenia, firma Oticon, udziela pierwotnemu nabywcy ograniczonej rocznej gwarancji.

Niniejsza gwarancja obowiązuje od dnia nabycia urządzenia i jest ważna przez okres jednego roku kalendarzowego od tej daty.

W poszczególnych krajach może obowiązywać rozszerzona gwarancja. Zapytaj protetyka słuchu o szczegółowe informacje.

Co obejmuje niniejsza gwarancja

Wszelkie komponenty elektroniczne, które nie funkcjonują prawidłowo podczas normalnego użytkowania w okresie obowiązywania gwarancji w wyniku wad wykonania, produkcyjnych lub projektowych po zwróceniu do punktu zakupu zostaną wymienione lub naprawione bez pobierania opłat za części ani robociznę. Koszty transportu ponosi klient. W przypadku ustalenia, że naprawa jest niemożliwa, całe urządzenie może zostać wymienione na równorzędne za obopólną zgodą protetyka słuchu i klienta.

Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja?

Niniejsza roczna, ograniczona gwarancja nie obejmuje:

- Nieprawidłowego funkcjonowania wynikającego z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub wypadku.
- Akcesoriów wymienionych w niniejszej instrukcji po upływie 90 dni od ich nabycia.
- Akumulatorów.
- Urządzeń podłączonych, instalowanych, regulowanych lub używanych w sposób niezgodny z podanymi instrukcjami.
- Odszkodowania za straty wynikłe z opóźnienia dostawy lub utraty urządzenia. Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawy lub wymianę urządzenia.

- Produktów uszkodzonych w transporcie, do momentu uzyskania przez wysyłającego raportu spedytora i przekazania go gwarantowi.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub konstrukcji każdego urządzenia w dowolnym czasie bez zobowiązania się do jakichkolwiek zmian w urządzeniach wcześniej zakupionych. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje wyrażone przez producenta. Żaden przedstawiciel ani inna osoba nie jest w związku ze sprzedażą lub użytkowaniem tego urządzenia upoważniona do podejmowania w imieniu producenta zobowiązań innych niż przedstawione powyżej.

Jeżeli Mikrofon ConnectLine wymaga naprawy na zasadach przewidzianych niniejszą gwarancją, zapakuj go starannie, aby uniknąć uszkodzeń w trakcie transportu, i dostarcz do punktu zakupu. Dołącz szczegółowy opis problemu, który wystąpił, swoje imię i nazwisko, adres do fakturowania i wysyłki oraz numer telefonu.

Gwarancja nie narusza żadnych praw, które mogą mieć zastosowanie na mocy przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Firma protekcyjna, w której się zaopatrujesz, może ustalić zakres gwarancji przekraczający tę ograniczoną gwarancję. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Ważne informacje dodatkowe

Bezprzewodowy Mikrofon ConnectLine posiada nadajnik radiowy wykorzystujący technologię przeskoku częstotliwości w paśmie ISM 2,4 GHz.

Maksymalna emitowana przez nadajnik moc nie przekracza poziomu 6 dBm; zastosowano niewielką antenę PCB o uzysku kierunkowym nieprzekraczającym 2 dBi (dB w odniesieniu do anteny izotropowej lub wielokierunkowej).

Moc promieniowania mikrofonu ConnectLine jest niższa niż wartość maksymalna określona przez międzynarodowe normy emisji dla urządzeń dopuszczonych do długotrwałego użytku przez ludzi. Dla porównania, jest ono niższe niż promieniowanie z takich urządzeń, jak suszarki do włosów, golarki elektryczne itp. Mikrofon

ConnectLine spełnia międzynarodowe normy kompatybilności elektromagnetycznej.

USA i Kanada

Ze względu na ograniczone rozmiary urządzenia szereg oznaczeń zgodności z odpowiednimi wymogami znajduje się w tym dokumencie.

Niniejsze urządzenie ma potwierdzone działanie zgodne z:

FCC ID: U28MIC110
IC: 1350B-MIC110

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC oraz z normami RSS dotyczącymi zwolnienia z posiadania licencji Ministerstwa Przemysłu Kanady.

Korzystanie z urządzenia podlega następującym warunkom:

Praca urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń. Urządzenie musi odbierać wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą być przyczyną niepożądanych działań.

Uwaga: To urządzenie zostało sprawdzone i uznane za zgodne z wymogami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Wymagania te zostały opracowane, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie będzie zainstalowane oraz użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak niezależnie

od spełnienia wszelkich wymogów, nie ma gwarancji, że w pewnych warunkach zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.

Jeżeli to urządzenie spowoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować skorygować zakłócenia na jeden lub kilka z podanych poniżej sposobów:

- Zmienić pozycję lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Zasięgnąć rady dostawcy lub doświadczonego serwisanta sprzętu RTV.

Firma Oticon deklaruje, że Mikrofon ConnectLine jest zgodny z istotnymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności jest dostępna w:



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dania
www.oticon.global



Utylizacja sprzętu elektronicznego musi być zgodna z lokalnymi przepisami.



E2831



Ogólne warunki gwarancji

§1

Oticon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 176148, numer REGON: 01208630500000, numer NIP: 5260303881, kapitał zakładowy: 352 000,00 zł (dalej „Oticon Polska”), udziela gwarancji na produkty firmy OTICON A/S wskazane w niniejszej gwarancji i na zasadach w niej wskazanych. Firma Oticon Polska Sp. z o.o. oświadcza, iż produkty będące przedmiotem niniejszej gwarancji są urządzeniami przeznaczonymi do poprawy słyszenia dźwięków otoczenia.

§2

Firma Oticon Polska oświadcza, iż zapewnia zgodność oferowanych produktów z właściwościami określonymi w §1 oraz ich niewadliwość w okresie trwania gwarancji, rozumianą jako możliwość swobodnego użytkowania tych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem opisanym w § 1.

§3

- ust. 1** Okres gwarancji wynosi:
- pkt. 1** 30 miesięcy na aparaty indywidualne wewnętrzne;
 - pkt. 2** 30 miesięcy na aparaty zauszne;
 - pkt. 3** 24 miesiące na urządzenia systemu ConnectLine oraz pilota do aparatów słuchowych;
 - pkt. 4** 30 miesięcy na systemy FM Oticon Amigo;
 - pkt. 5** 3 miesiące na niedopasowanie obudowy aparatu wewnętrznego do anatomii ucha (np. uwieranie, poluzowanie, sprzężenia) wynikające ze zmiany budowy anatomicznej ucha. Gwarancja, o której mowa w niniejszym punkcie, jest niezależna od gwarancji, o której mowa w pkt. 1.
 - pkt. 6** 3 miesiące na akcesoria wymienione w instrukcjach urządzeń systemów ConnectLine i FM Oticon Amigo;
 - pkt. 7** 3 miesiące na część wymienioną w wyniku naprawy pogwarancyjnej, z wyjątkiem wzmacniacza, mikrofonu i słuchawki, na które gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy;
- ust. 2** Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania Kupującemu przedmiotu gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 4.
- ust. 3** Bieg terminu gwarancji w wypadku, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 7, rozpoczyna się z dniem wydania Kupującemu przedmiotu gwarancji, po wykonaniu naprawy pogwarancyjnej.

- ust. 4** Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji dostarczono uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonano istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli wymieniono część rzeczy, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
- ust. 5** Uprawnienia wynikające z niniejszego dokumentu przysługują tylko wobec produktów firmy OTICON A/S zakupionych jako fabrycznie nowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Firma Oticon Polska oświadcza, iż zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu gwarancji ujawnionej w okresie gwarancji, o ile wada ta powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej oraz nieodpłatnego usunięcia wady w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 5.

§5

ust. 1 Firma Oticon Polska oświadcza, iż nieodpłatne usunięcie wady, o którym mowa w §4 nastąpi w terminie:

- pkt. 1** 14 dni roboczych, począwszy od dnia dostarczenia przedmiotu gwarancji do serwisu*;
- pkt. 2** 31 dni roboczych, począwszy od dnia dostarczenia przedmiotu gwarancji do serwisu, gdy z powodu konieczności wykonania specjalistycznych napraw nie jest możliwa naprawa w kraju (brak właściwej elektroniki), lub gdy z powodu nie posiadania przez serwis niezbędnych do naprawy części zamiennych zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
- ust. 2** W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, firma Oticon Polska powiadomi Kupującego na piśmie lub telefonicznie w terminie 10 dni od daty dostarczenia przedmiotu gwarancji do serwisu, o braku możliwości realizacji naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.

§6

- ust. 1** Gwarancja nie obejmuje:
- pkt. 1** uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją;
- pkt. 2** mechanicznych uszkodzeń, przykładowo: pęknięcia obudowy, urwania komory baterii, uszkodzenia potencjometru głośności, ułamania przycisku, pęknięcia płytki wzmacniacza na skutek upuszczenia, uszkodzenia gniazd wynikającego z użycia nadmiernej siły i in.;

- pkt. 3** chemicznych uszkodzeń na skutek: zabrudzenia, zamoczenia, działania różnych kosmetyków (np. lakieru do włosów, żelu do włosów, szamponu i odżywki do włosów) oraz innych szkodliwych substancji (np. rozpuszczalnika, farby, lakieru), używania środków czyszczących innych niż przeznaczone do danych produktów lub czyszczenia produktów w sposób niezgodny z instrukcją;
- pkt. 4** uszkodzeń spowodowanych zabrudzeniem wydzielinami (woskowiną, potem), kurzem lub pyłem, a w przypadku aparatu wewnętrznego, którego prawidłowe działanie zależy od regularnej wymiany filtrów ochronnych, uszkodzeń wynikających z używania aparatu bez filtra lub używania uszkodzonego bądź zużytego filtra. Wymiana filtrów powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami, o których mowa w §9.
- pkt. 5** sprężeń powstałych z powodu nieszczelności obudowy aparatu wewnętrznego wynikających ze zmiany budowy anatomicznej ucha powstałych po okresie określonym w §3 ust. 1 pkt. 5;
- pkt. 6** uszkodzeń powstałych w wyniku wylania lub korozji baterii, stosowania baterii innych niż zalecane przez producenta lub dystrybutora, o innym napięciu niż zalecane przez producenta lub dystrybutora lub przeznaczonych do innych urządzeń.

§7

Gwarancja nie obejmuje następujących elementów: filtra ochronnego, żyłki do wyjmowania aparatu z ucha, żyłki mocującej, rożka, dźwiękowodu, nasadki, baterii i akumulatorów.

§8

Kupujący zobowiązany jest do użytkowania produktu zgodnie z instrukcją wydawaną wraz z produktem, pod rygorem utraty uprawnień opisanych w niniejszym dokumencie.

§9

W przypadku zakupu aparatu słuchowego z filtrami ochronnymi, Kupujący zobowiązany jest do wymiany filtrów nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§10

Kupujący traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w wypadku:

- pkt. 1** użytkowania produktu niezgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji lub instrukcji;
- pkt. 2** wykonania naprawy samodzielnej lub w nieautoryzowanych punktach serwisowych, chyba że wada nie wynikała z takich czynności;
- pkt. 3** wady wynikającej z celowego zniszczenia lub uszkodzenia produktu;

pkt. 4 wady wynikającej z nieumyślnego zniszczenia lub uszkodzenia produktu.

§11

Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli:

- pkt. 1** posiada wpisany numer seryjny zgodny z numerem na produkcie;
- pkt. 2** posiada wpisany typ produktu;
- pkt. 3** posiada wpisaną datę sprzedaży;
- pkt. 4** posiada pieczętkę firmy i podpis sprzedającego;
- pkt. 5** nie zawiera skreśleń lub poprawek dokonanych przez osobę nieuprawnioną.

§12

Produkty firmy OTICON A/S objęte są międzynarodową gwarancją na czas 12 miesięcy od dnia zakupu.

§13

Przedmiotowa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową.

§14

W zakresie nieuregulowanym w przedmiotowej gwarancji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks Cywilny” (Dz. U nr 16, poz. 93, z 1971 z późniejszymi zmianami), w szczególności o gwarancji oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

*) Adres autoryzowanego serwisu produktów firmy OTICON A/S będących przedmiotem powyższej gwarancji:
DGS Poland Sp. z o.o.
ul. Lubieszewska 42, Mierzyn
72-006 Szczecin

169212PL / 20.09.2016

169212PL / 20.09.2016



oticon
PEOPLE FIRST

169212PL / 20.09.2016